



Solution pour Désinfection des Nébuliseurs : **BACTYNEB®**

- BACTYNEB est un produit désinfectant pour traiter les nébuliseurs PARI dont l'eFLOW *rapid*
- L'efficacité bactéricide de BACTYNEB a été validée par le laboratoire d'hygiène hospitalier de l'Institut Pasteur de Lille. (l'étude est disponible sur demande).
- BACTYNEB est conditionné en boîtes de 30 dosettes ; cela permet de couvrir une période d'un mois de traitement.
- BACTYNEB peut être fourni directement aux patients ou aux prestataires de soins à domicile.
- Code ACL : 3401047568879 Référence PulmoMed : 70006

ETIQUETAGE DU PRODUIT

BACTYNEB™
DESINFECTANT CONCENTRE
POUR NEBULISEURS

BACTERICIDE conforme normes européennes NF EN 1040, NF EN 13737, NF EN 1276 et normes AFNOR NF T 72-150 spectre 5, NFT 72-190. Actif sur *Staphylococcus aureus* multi-résistant, et *pseudomonas aeruginosa*.

FONGICIDE CONFORME NORME EUROPÉENNE nf en 1275

ACTIVITE SUR LES VIRUS : Poliovirus, Adénovirus, Herpes virus selon la méthodologie de la norme AFNOR NF T 72-180. Inactivation du virus VIH en 5 minutes. Inactivation du virus VHB en 5 minutes (IPL 062794)

ACTIVITE SUR LES SPORES de *Clostridium sporogenes* 51 CIP 7939 et de *Bacillus cereus* CIP 7803 selon la méthodologie de la norme AFNOR T-72301 (conditions de la norme AFNOR NF T 72-231).

Distribué par :
PulmoMed SARL
92000 NANTERRE – France
TEL. +33 1 56 83 85 00

Fabriqué par :
Laboratoire GARCIN-BACTINYL
69200 VENISSIEUX - France

BACTYNEB™

INDICATION
Désinfection par trempage de nébuliseurs pour aérosol thérapie.

COMPOSITION
Peroxydes stabilisés, ammoniums quaternaires, huiles essentielles, excipients.

MODE D'EMPLOI
Préparer un bain de BACTYNEB™ : une dose de 20 ml pour un litre d'eau. Laisser tremper le matériel 15 minutes pour atteindre un haut niveau de désinfection. Rincer. Sécher. Stocker dans un endroit propre et sec.

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Ne pas mélanger avec d'autres produits (produits anioniques, produits chlorés...). Laver à l'eau claire en cas de projections oculaires ou sur les muqueuses. Ne pas avaler.

Distribué par :
PulmoMed SARL
92000 NANTERRE – France
TEL. +33 1 56 83 85 00

Fabriqué par :
Laboratoire GARCIN-BACTINYL
69200 VENISSIEUX - France