

VORTEX®



Positionner, expirer,
respirer

Spécialistes de l'inhalation efficace





VORTEX®

le roi du
tourbillon

« Appuyer et inhaler » pourrait résumer l'utilisation d'un aérosol-doseur. Ce n'est malheureusement pas aussi simple pour un grand nombre de patients, en particulier pour les enfants et les personnes âgées. En effet, ces patients ont souvent des difficultés à actionner l'aérosol-doseur tout en inhalant. Il en résulte fréquemment une déposition accrue au niveau de la bouche et du pharynx.

La chambre d'inhalation antistatique VORTEX® avec son principe unique de vortex contribue à remédier à cet inconvénient des aérosols-doseurs. Lorsque le patient inhale, le nuage de l'aérosol est déplacé dans un tourbillon. Ce sont alors principalement les fines gouttelettes qui sont dirigées vers les poumons, et la zone bouche-pharynx peut ne pas subir de dépositions indésirables de médicament.




Sans chambre d'inhalation :

Plus particulièrement si le patient manque de coordination, une grande partie du médicament peut être « perdue » sur le trajet qui mène aux poumons.

Déposition importante au niveau du pharynx

Faible déposition au niveau des poumons

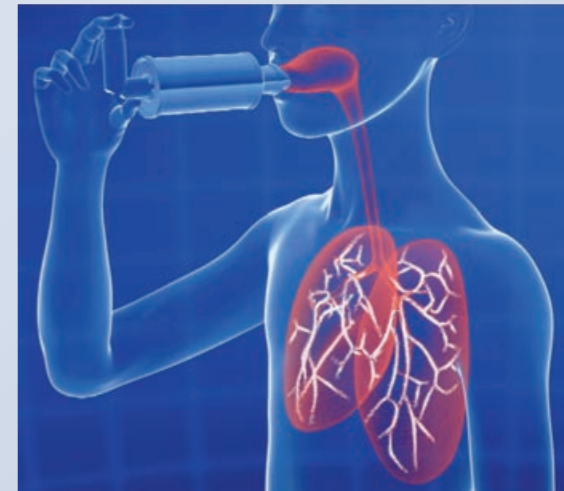

Avec la chambre d'inhalation :

À partir de la chambre d'inhalation, les fines gouttelettes de médicament peuvent être expirées progressivement. En revanche, les grosses gouttelettes sont retenues dans la chambre.:

Faible déposition au niveau du pharynx

Déposition importante au niveau des poumons

7 caractéristiques spécifiques

VORTEX®

Principe du vortex


Contribution au transport des petites gouttelettes d'aérosol dans les poumons

Chambre métallique antistatique

Dosage fiable

Masques SmartTouch

Utilisation souple

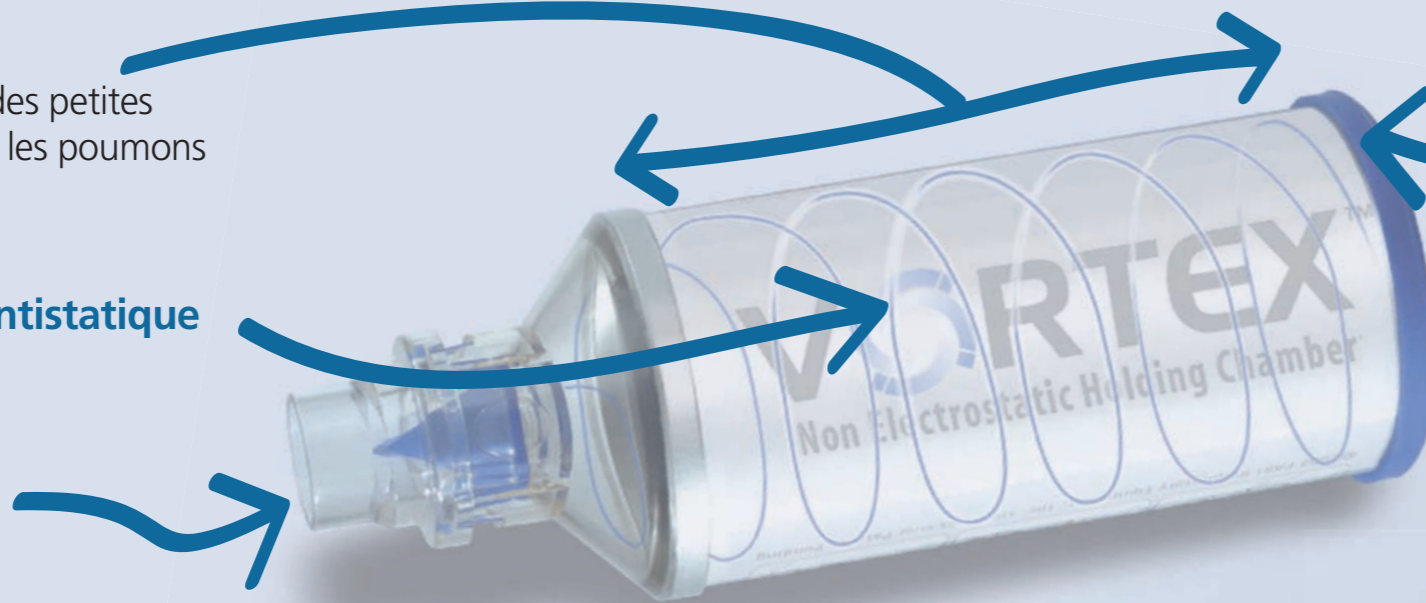

Adaptateur universel

Compatibilité avec tous les aérosols-doseurs en usage

Faible volume d'espace mort

Désinfection possible à domicile

Désinfection et stérilisation possibles à l'hôpital

« Les enfants âgés de moins de 18 mois doivent inhaler profondément 4 à 6 fois, les enfants de plus de 18 mois 2 à 4 fois. »

VORTEX® grandit avec les patients :

0-2 Ans	À partir de 2 Ans	Adultes	À partir de 4 Ans	0-2 Ans	À partir de 2 Ans	Adultes
VORTEX® avec masque pour bébés Coccinelle	VORTEX® avec masque pour enfants Grenouille	VORTEX® avec masque pour adultes	VORTEX®	Masque pour bébés Coccinelle VORTEX®	Masque pour enfants Grenouille VORTEX®	Masque pour adultes souple avec raccordement
						

Nouveau ! Masques pour bébés et enfants PARI SmartTouch



Aspect ludique

« Marie la coccinelle » et « Félix la grenouille » font de l'inhalation un jeu



Sécurité en termes d'hygiène

Désinfection possible à l'eau bouillante ou au vaporisateur



Douceur et souplesse au contact

Positionnement étanche sur le visage pour une déposition efficace au niveau des poumons



Spécialistes de l'inhalation efficace **PARI**



À chaque âge, son équipement :



VORTEX®

À partir de 4 ans
N° réf. 051G1000
Code ACL 3401043304501



VORTEX® avec masque pour bébés Coccinelle

0-2 Ans
N° réf. 051G2020; Code ACL 3401099592532



VORTEX® avec masque pour enfants Grenouille

À partir de 2 ans
N° réf. 051G2040
Code ACL 3401099592303



VORTEX® avec masque pour adultes

N° réf. 051G1060
Code ACL 3401043304211

Accessoires



Masque pour bébés Coccinelle VORTEX®

0-2 Ans
N° réf. 041G0712



Masque pour enfants Grenouille VORTEX®

À partir de 2 Ans
N° réf. 041G0713

**Masque pour adultes
souple**
avec raccordement
pour masque
N° réf. 051G0740



Embout buccal VORTEX®

N° réf. 051B0100



Bague de raccordement VORTEX®

N° réf. 051E5004

Spécialistes de l'inhalation efficace



Pour toutes informations supplémentaires sur
l'utilisation, l'entretien et le nettoyage adressez-vous:

à notre distributeur officiel France

PulmoMed SARL

11 ave de l'île Saint-Martin
F-92737 Nanterre Cedex, France
Téléphone: +33 (0) 1 56 83 85 00
Téléfax: +33 (0) 1 56 83 85 09
e-mail: clients@pulmomed.fr
www.pulmomed.fr

à notre responsable de zone Maghreb

Hervé CARTEAU

Adresse : PulmoMed SARL (ci-dessus)
Tel 33 6 75 31 18 75
e-mail h.carreau@pari.de

PARI GmbH – Spezialisten für effektive Inhalation
Moosstraße 3 · 82319 Starnberg
Telefon +49 (0) 8151 279-0 · Fax +49 (0) 8151 279-101

PARI sur Internet :
E-Mail: info@pari.de · www.pari.de