
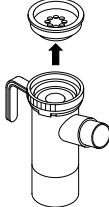

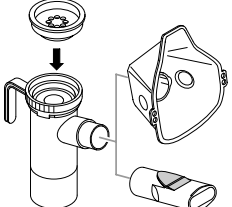
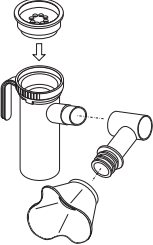
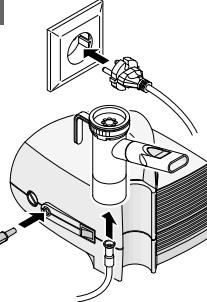
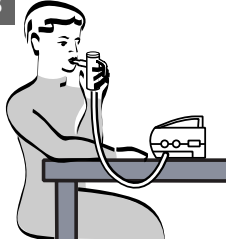
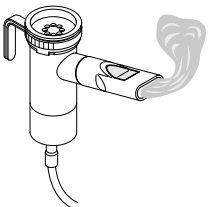


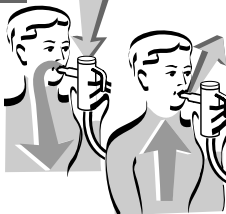
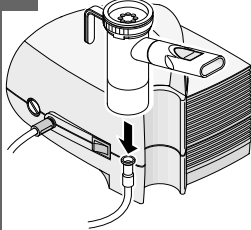
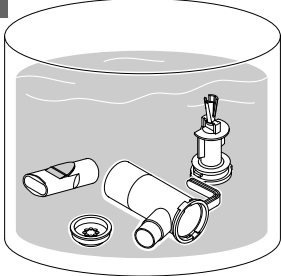
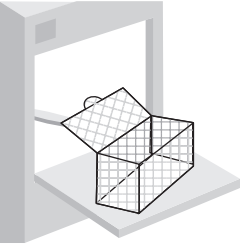
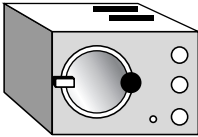
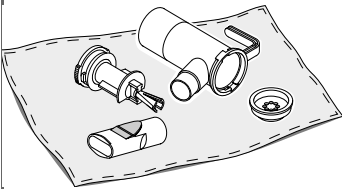
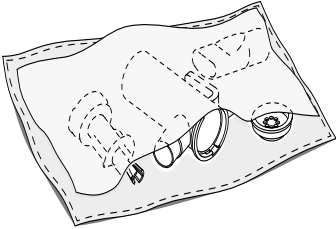
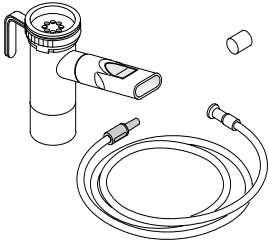


L'inhalation avec les nébuliseurs PARI LC PLUS et PARI LC STAR

<p>1</p>  <p>Bien se laver les mains avant chaque séance.</p>	<p>2</p>  <p>Enlever la valve inspiratoire du sommet du nébuliseur.</p>	<p>3</p>  <p>Remplir le nébuliseur avec la quantité de solution médicamenteuse prescrite par le médecin.</p>	<p>4a</p>  <p>Rattacher la valve inspiratoire et l'embout buccal ou le masque sur le nébuliseur. Attention: En cas d'utilisation du masque ne pas mettre la valve inspiratoire (exceptés SmartMask & Masque PARI BABY).</p>
<p>4b</p>  <p>En cas d'utilisation du masque pour nourrisson, emboîter le coude et orienter le masque, en fonction de la position du bébé.</p>	<p>5</p>  <p>Brancher le cordon d'alimentation au secteur et mettre en route le compresseur.</p>	<p>6</p>  <p>S'asseoir en position droite et détendue.</p>	<p>7</p>  <p>La séance débute quand l'aérosol médicamenteux commence à sortir du nébuliseur.</p>
<p>8a</p>  <p>Maintenir l'embout buccal entre les dents et fermer les lèvres autour de celui-ci ou mettre le masque en place sur le nez et la bouche.</p>	<p>8b</p>  <p>Maintenir le nébuliseur en position verticale. Garder le masque sur le nez et la bouche en exerçant une légère pression.</p>	<p>9</p>  <p>Inhaler calmement et profondément à travers l'embout buccal ou le masque, retenir l'inspiration pendant quelques secondes, puis expirer lentement. Un changement de bruit dans le nébuliseur signale que la séance est terminée.</p>	<p>10</p>  <p>Débrancher le tuyau du fond du nébuliseur et laisser le compresseur faire passer de l'air par le tuyau pendant quelques minutes pour sécher la buée ou la condensation émise dans le tuyau, s'il y a lieu.</p>

A faire après chaque séance:

<p>1</p>  <p>Nettoyage / Désinfection Méthode recommandée : • Laisser toutes les pièces du nébuleur dans une solution de nettoyage / désinfection du type aldéhyde avec marquage CE, par exemple Korsorex® et ensuite bien rincer sous l'eau courante.</p>	<p>2</p>  <p>Nettoyage / Désinfection Méthode alternative : Désinfection thermique dans une machine à laver les instruments. - sélectionner le programme à 90°C - sélectionner le programme à 60°C avec une solution de nettoyage / désinfection</p>	<p>3</p>  <p>Stérilisation à Vapeur - à 121°C (pendant au moins 20 min) - à 134°C (pendant au moins 7 min) <u>attention :</u> Le nébuleur doit être stérilisé à chaque changement de patient.</p>
<p>4</p>  <p>Séchage • Toutes les pièces doivent être sèches avant de remonter le nébuleur. Ne remonter le nébuleur qu'au moment de l'utilisation.</p>	<p>5</p>  <p>Conservation Stocker les pièces dans un lieu exempt de contamination.</p>	<p>6</p>  <p>Maintenance annuelle • Au moins une fois par an changer le nébuleur, le filtre à air, et le tuyau. (Kits PARI de Rechange Annuel). Si endommagé ou salé, le changer tout de suite.</p>

Veillez consulter les instructions détaillées pour tous les compresseurs et nébuleurs PARI.

Spezialisten für effektive Inhalation



PARI GmbH

Moosstrasse 3 • D-82319 Starnberg • Germany

Tel.: +49 (81 51) 279-0 • Fax: +49 (81 51) 279-101

e-mail: info@pari.de • www.pari.com • www.pari.de